



الجل الجديد المتقدم في علاج الجروح والحروق



حاصل على علامة الجودة الأوروبية

AXXO GmbH
Rödingsmarkt 20
20459 Hamburg
Germany

+49 (0)40 38 919 40
pharma@axxo.de
www.axxo.de

الفوائد

+ يعزز من عملية إلتئام الجروح والشفاء السريع.

+ يقلل بشكل فعال من التفاعل البكتيري في الجرح ويزيل ويمنع تشكل البيو فيلم.

+ ضمان ترطيب مستمر حيث يخلق ويحافظ على بيئة رطبة ويدعم التنظير الذاتي.

+ منتج غير محسس للانسجة ، غير مهيج للجروح أو الحروق ، ومعقم فعال.

+ ليس له أي آثار جانبية تذكر.

تنويه :

يفضل إستعمال المنتج لمريض واحد فقط ، وعدم إستخدامه مع منتجات أخرى قد تحد من فعالية الجل.



كيفية الاستخدام :

يجب وضع AX XO WOUNDGEL بحرية على المنطقة المتضررة مع ضمان تغطية أكبر قدر ممكن ، والحفاظ على سطح المكان المصاب رطباً باستمرار لضمان التعقيم والطهارة المناسبين.

يتم تحرير الأنسجة الميتة بلطف وإزالتها عند تغيير الضماد كل مرة .

للحصول على أفضل النتائج ، يجب تنظيف الجرح ومنطقة الجلد حول الجرح بشكل مناسب قبل وضع المنتج . وقد يبقى الجل بكميات قليلة في المنطقة المصابة بين تغييرات الضماد بدون أن يسبب أي ضرر.

المكونات :

تحتوي التركيبة على أيسوبروبيل بيتاين غير متماثل ، بولي هكسانيد ، ماء مقطر ، جليسرول ، هيدروكسي إيثيل سلولوز.


AX XO WOUNDGEL هو عبارة عن هيدروجيل غير مسبب للحساسية يعتمد على تقنية فريدة من نوعها في معالجة الجروح والحروق بأنواعها.

AX XO WOUNDGEL يحتوي على مركب البولي هكسانيد مدمج في ميكروسبيرات النشا القابلة للتحلل الحيوي بشكل كامل، والتي يتم تعليقها في مصفوفة هلامية للوقاية والعلاج الأمثل للعدوى.


يوفر AX XO WOUNDGEL الرطوبة للجرح، مع الحفاظ على قدرة امتصاص كافية لحطام الإفرازات و البكتيريا.

مجالات استعماله :

- تطهير وترطيب الجروح الجلدية (الجافة أو مع إفرازات قليلة).
- في معالجة الجروح المفتوحة.
- ما بعد العمليات الجراحية.
- تقرحات الجلد المزمنة (مثل تقرحات الأوردة في حالات السكري وقرحة الفراش).
- الحروق من الدرجة الاولى والثانية.
- الحروق الحرارية وخاصة تلك الناجمة عن استعمال الليزر وغيره.

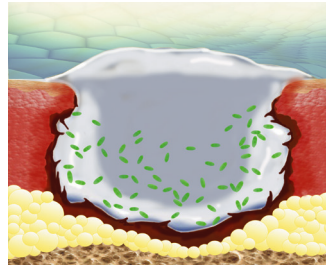

Bacteria and biofilm reduction softens necrotic tissue.

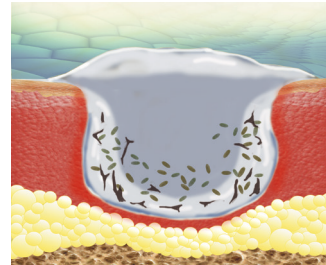

Facilitating autolytic debridement and increase wound healing.

جل سهل الاستخدام فعال في ترطيب وتجديد خلايا البشرة

